

NESSUNA FATICA PER INDOSSARE LA CALZA TERAPEUTICA CON PUNTA APERTA

ISTRUZIONI:

1. Infilare il calzocalze sulla punta del piede.
2. Dopo aver rovesciato la calza, infilarla dalla punta sul calzocalze fino quasi all'inizio del tallone.
3. Rovesciare la calza tirandola verso di se dal punto più largo, ponendo molta attenzione a non tirare i fili con le unghie, e posizionando la calza sulla gamba, togliendo le eventuali pieghe.
4. estrarre il calza calze dalla punta aperta.
5. la calza risulta indossata con minore fatica.

ANY EFFORT TO WEAR OPEN TOE THERAPEUTIC STOCKINGS

INSTRUCTIONS FOR USE:

1. wearing the device on the toe of the foot
1. rolling the stocking to the heel wearing it, sliding on the device
2. positioning correctly the heel and wearing completely the stocking without forming pleats
3. taking out the device from the open toe
4. the stocking is easily worn



1.




2.



3.



4.

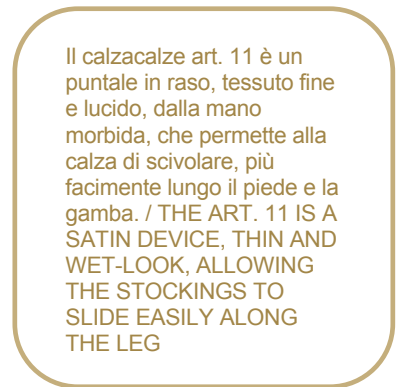

5.

Il calzocalze art. 11 è un puntale in raso, tessuto fine e lucido, dalla mano morbida, che permette alla calza di scivolare, più facilmente lungo il piede e la gamba. / THE ART. 11 IS A SATIN DEVICE, THIN AND WET-LOOK, ALLOWING THE STOCKINGS TO SLIDE EASILY ALONG THE LEG